

FICHE TECHNIQUE

100 lingettes épaisses

Pack de 100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-immersibles.

Lingettes épaisses et douces..

Indications

Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immersibles et non-invasifs (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes externes, ...).

Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant.

Conditionnement

Format de lingette : 180 x 200mm.

Pack de 100 lingettes épaisses.

Carton de 12 packs.

Actifs

Ethanol (< 3%)

Diméthylbenzylammonium chloride

Propan-2-ol (< 1%).

Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)



Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.

Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.

Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.

Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.

Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus,

Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus*

en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.

Mode d'emploi

Soulever le dévidoir et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice.

Tirer ensuite sur la première lingette.

Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation.

Produit prêt à l'emploi à usage unique.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

A utiliser dans les 3 mois après ouverture.

Votre Vendeur(se) :

1 RÉF : HB109